

Fiche technique




Informations



Désignation	Barre relevable Arsis® 600 mm, Aluminium Epoxy Blanc
Référence	048660

Description

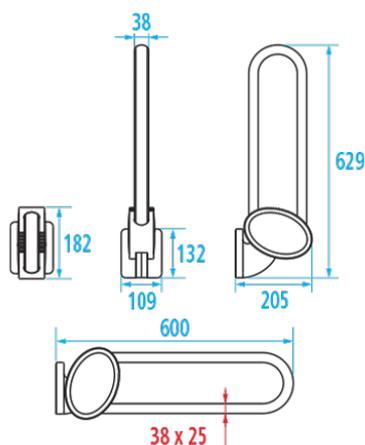

Fixations invisibles.
Tube elliptique en aluminium blanc 38 x 25 mm renforcé.
Support mural, articulation et cache en résine de synthèse blanc.
Visserie fournie.
Le design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis®.
Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

[» Consulter la documentation](#)

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Finition	Epoxy
Matière	Aluminium
Diamètre Ø	38 x 25 mm
Dimensions	600 x 109 x 182 mm
Tests laboratoire à	225 kg
Conditionnement	Boîte carton
Garantie	5 ans
CE - charge admissible	150 kg
Gencod	3563390486603
Code douanier	761519
Notice	A48960812

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée pour la barre supérieure : 80 cm du sol dans les toilettes et la douche, ou à la hauteur du lavabo.

Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Sur cloisons peu résistantes, 3 solutions : le poteau de fixation réf. 048400, la béquille de soutien réf. 048610 ou installer une contreplaque derrière la cloison. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d'usage

Fonction

Maintien	★★★☆☆
Relevage	★★★★
Transfert	★★★☆☆
Repos	★★★☆☆

Caractéristiques

Horizontal	★★★★
Vertical	★★★★
Oblique	☆☆☆☆
Anticorrosion	★★★★

Type d'utilisation

Bain	☆☆☆☆
Douche	★★★★
WC	★★★★
Lavabo	★★★☆☆
Vestiaire/Cabine	★★★☆☆

Lieux d'utilisation

Ets médicaux	★★★★
ERP/IOP	★★★★
Hôtels	★★★★
Habitats privés	★★★☆☆
Lieux de travail	★★★☆☆